



SERINGA MEKON PET INSULINA U-100 CÃES E GATOS C/10un 0,3ML 8X30MM - 0,5ML 8X30MM PARA USO VETERINÁRIO

10 Seringas estéreis de uso único. Para uso com insulina U-100 e U-40. Comprimento 8x30MM – Capacidade 0,3ML e 0,5ML. Escala de 1 em 1 Unidade. Calibre 30G. Não destinado ao USO Humano.

“Conforme Decreto 5.053, de 22 de abril de 2004 (Art. 39 e 40) e da Instrução Normativa nº 37 de 8 de julho de 1999”.

“Produto isento de Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cadastrado sob o IN 37 DE 08/07/1999/SP”.

Não reutilizar. Estéril. Esterilizado por Radiação Gama. Atóxico. Apirogênico. Não é feito com látex de borracha natural. Para o descarte seguro das seringas, consulte a regulamentação local. A esterilidade da seringa é garantida até a retirada dos protetores laranjas das extremidades. Não utilizar se o protetor laranja da extremidade estiver deslocado.

Instruções de uso:

- Lave as mãos e separe os materiais. Para expor o êmbolo, gire a tampa laranja para quebrar o selo e então puxe.
- * Faça a antissepsia da borracha do frasco de insulina com o Swab Mekon (alcool isopropílico 70%).
- Para expor a agulha, gire a tampa laranja e então puxe de uma só vez, tomando cuidado para não danificar a agulha.
- Puxe o êmbolo para baixo para aspirar o ar lentamente até a quantidade de insulina prescrita.
- Introduza a agulha no frasco e injete o ar, pressionando o êmbolo completamente
- Mantenha a agulha no frasco de insulina. Vire o frasco e puxe o êmbolo lentamente até a quantidade de insulina prescrita.
- Para registrar a dose prescrita, posicione a linha preta fina do êmbolo até o número desejado de unidades de insulina.
- Verifique se há bolhas de ar na seringa. Se houver, bata lentamente com dedo no corpo da seringa ou injete de volta a insulina no frasco e inicie novamente o preparo.
- Faça antissepsia do local a ser aplicado com Swab Mekon (alcool isopropílico 70%).
- Segure a seringa como se fosse um lápis. Faça a prega cutânea no animal de estimação. Introduza a agulha na pele do animal em um ângulo de 45º graus. Injete a insulina empurrando o embolo até o final. Retire a agulha em movimento único e solte a prega. Não massageie o local.
- Não reencape a agulha. Coloque a seringa usada num recipiente adequado para perfuro cortantes e descarte com segurança, seguindo as recomendações locais. Utilize a seringa somente uma vez.

Precisa entrar em contato? Ligue para **MEKON PET**
(Grupo Cirurgica Medic / Medforma Importadora de Produtos Eireli)
Fone: 15 3224-3023
Web: www.mekon.com.br/linhapet - sac@mekon.com.br



COD MEKS03830PET



COD MEKS03850PET



Importador Oficial no Brasil:
MEDFORMA IMPORTADORA EIRELI – RUA GOIÁS 112, CENTRO SOROCABA SP - CEP 18035-550
CNPJ 33.811.197/0001-06

FABRICADO POR: ZHEJIANG KINDLY MEDICAL DEVICES CO., LTD.
No. 758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park, Longwan District 325025 Wenzhou, Zhejiang province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



SERINGA MEKON PET INSULINA U-100 CÃES E GATOS C/10un 0,3ML 8X30MM - 0,5ML 8X30MM PARA USO VETERINÁRIO

CARACTERÍSTICAS:

- Indicada para cães e gatos;
- Capacidade em 2 versões: 30 e 50 unidades de insulina;
- Graduada de 1 em 1 para doses mais precisas;
- Ideal para insulinas com concentração de U-100 e compatível com U-40;
- Agulha resistente;
- Única do mercado Lubrificada com agulha mais fina e menor, para maior conforto ao seu Pet;
- Adequada para diferentes espessuras de pele do animal;
- Disponível em embalagem com 10 unidades.

ESPECIFICAÇÕES:

- Idade: Filhote, Adulto e Sênior
- Pet: Cachorros e Gatos
- Porte de Raça: Mini, Pequeno, Médio, Grande e Gigante
- Indicação: Animais Diabéticos
- Tipo: Seringa para medicação de cães e gatos
- Apresentação: Disponível em embalagem com 10 unidades.

RECOMENDAÇÕES:

Seringa para aplicação de insulina com concentração U-100, de uso único, com escala graduada de 1, em 1, com agulha fixa (integrada) nas apresentações de 8x30MM, sem espaço residual e com capacidade para até 30 ou 50 unidade de insulina. Infelizmente, nossos amigos de quatro patas estão suscetíveis a doenças comuns em humanos como, por exemplo, a diabetes. Para proporcionar maior conforto ao pet, a seringa MEKON PET insulina é uma boa escolha, dado que sua aplicação é própria para a pele animal e previne grandes incômodos no peludo.

Sendo assim, como o principal tratamento para regular a glicose em animais é a administração de insulina por injeção, que tal fazer a aplicação com um item que oferece maior conforto? A seringa de insulina MEKON PET tem diversos benefícios, pois:

- Projetada com U-100 e compatível para U-40;
- Agulha lubrificada para maior conforto do Pet.
- Adequada para diferentes espessuras de pele animal.

A seringa MEKON PET insulina é um objeto completo para oferecer tudo que seu cãozinho ou bichano precisa. A seguir, conheça mais sobre a seringa de insulina e os cuidados para manter a saúde do peludo em dia.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES:

Posso utilizar a mesma seringa para fazer uma segunda aplicação?

Não. A fim de evitar possíveis contaminações causadas por bactérias, é muito importante que você troque a seringa para insulina MEKON PET sempre que fizer a aplicação no pet.

Cães e gatos podem utilizar seringas feitas para humanos?

Não. A espessura da pele dos animais de estimação é diferente da pele humana. Para oferecer maior conforto e não provocar dor durante a aplicação ao pet, é importante utilizar a agulha de insulina e seringa própria para cães e gatos.

Posso fazer a aplicação sem consultar um veterinário?

Não. Converse com um veterinário sobre o melhor item para seu pet, pois, além de orientar sobre o modo de aplicação, o especialista informará a melhor agulha, seringa e outros objetos indispensáveis na hora da aplicação de insulina para cachorro e gato.

OUTROS CUIDADOS PARA CÃES E GATOS COM DIABETES:

Além de proporcionar todo o conforto com a seringa para insulina MEKON PET, é muito importante que você lhe ofereça somente itens próprios para animais. Consulte um médico-veterinário regularmente para monitorar a saúde do seu cãozinho ou bichano.

Não se esqueça também de ler todas as instruções presentes nas embalagens e verificar a necessidade de outros produtos complementares. Assim, você fornece todo conforto e qualidade de vida ao peludo.

