



## SERINGAS PARA INSULINA MEKON - 0,3ML - 6x0,25MM

### INDICAÇÃO:

A SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA FIXA MEKON de uso manual é utilizada intradermicamente para aplicar insulina U100, toxina botulínica e outros medicamentos.

### PRECAUÇÕES:

Após a realização do procedimento descartar a SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO COM AGULHA FIXA MEKON em local próprio para materiais cortantes contaminados.

Para os pacientes que misturam dois tipos de insulina recomenda-se não alterar a ordem da mistura prescrita pelo médico.

### ADVERTÊNCIAS:

- A seringa MEKON deve ser utilizada uma única vez. Para evitar a sua reutilização indevida, descarte a seringa e a agulha imediatamente após a aplicação.
- Estéril se a embalagem estiver selada e não danificada.

### CUIDADOS:

Siga estas instruções a fim de evitar erros na dosagem.

### COMPOSIÇÃO:

Cilindro e Êmbolo: Polipropileno

Tampas: Polietileno

Agulha: Aço Inoxidável 304

Vedação: Borracha sintética (Poliisopreno)

### MODO DE USAR:

1. Antes de iniciar a aplicação de insulina ou outro medicamento, lavar as suas mãos com água e sabão.
2. Limpar o frasco com álcool e algodão.
3. Preparar a insulina.
4. Limpar perfeitamente a área de aplicação com álcool e algodão.
5. Segurar a pele com ajuda do dedo polegar e indicador e formar uma prega; inserir a agulha inclinada a um ângulo entre 45° e 90°.
6. Puxar um pouco o êmbolo e se observar sangue, retirar a agulha e injetar do outro lado.
7. Uma vez que a agulha estiver introduzida, empurrar o êmbolo suavemente até que todo o conteúdo da insulina seja injetado.
8. Ao terminar retirar a agulha e descartar a seringa para insulina.
9. Para medir a dose corretamente, encoste o êmbolo no fundo da seringa. Puxe o êmbolo levando-o até a dosagem desejada, localizando-o na escala gravada no corpo da seringa.



Distribuidor Oficial:  
MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI – RUA GOIÁZ 112, CENTRO - SOROCABA - SP  
CEP 18035-550 - CNPJ 33.811.197/0001-06

FABRICADO POR:  
DL Médica, S.A. de C.V.  
Febrero de 1917 S/N, Col. Zona Industrial,  
Chalco, Edo. de México, México - C.P. 56600



Atendimento ao consumidor  
SAC: (15) 3224-3023  
e-mail: sac@medforma.com.br

# SERINGAS PARA INSULINA MEKON - 0,3mL – 6x0,25mm

Nome Técnico: Seringas Descartáveis

Part Number: MEKS03625100

Marca / Submarca: MEKON

Código de barras: 7898947319216

Modelo: Seringas para insulina – 0,3mL (15/64”) – 6x0,25mm -31G

Insulina U-100: para 30 unidades ou menos

Cada traço na escala de graduação representa 1 unidade

Atóxica | Apirogênica | Latex Free

Seringa estéril de uso único para insulina com agulha fixa

- Agulha Ultra-fina – Bisel Multi-facetado com revestimento lubrificante, que permite a injeção mais suave e confortável

Metodo de esterilização: **ESTÉRIL OE** - Esterilidade garantida por óxido de etileno.

Produto certificado pelo INMETRO - Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011.

Apresentação: Caixa com 100 unidades (10x10) Embalagem Blister



Indicação: As Seringas para Insulina com Agulha Mekon são produtos de finalidade médica, para administração de insulina, toxina botulínica e outros medicamentos. Consiste em tubo graduado com êmbolo móvel, conectados a agulha.

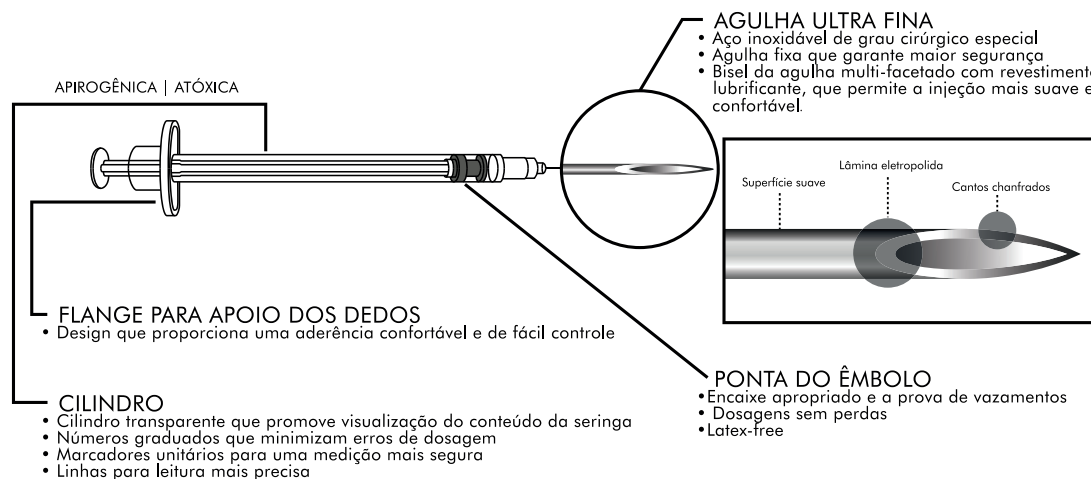


Imagem ilustrativa da seringa para insulina

## Composição:

**Cilindro:** Polipropileno / CAS No. 9003-07-0

**Êmbolo:** Polipropileno / CAS No. 9003-07-0

**Vedação:** Mistura de: Poliisopreno (100 partes), Enchimento (70 partes) e Acelerador (0.1 parte)

**Agulha:** Aço Inoxidável / STS 304L

**Tampa:** Polietileno / CAS No. 9002-88-4



## DISTRIBUIDOR OFICIAL:

MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ: 33.811.197/0001-06

Rua Goiás, 112 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-550 Fone: (15) 3224-3023

# SERINGAS PARA INSULINA MEKON - 0,3mL – 6x0,25mm

## Instruções de Uso:

1. Para expor o êmbolo, gire a tampa inferior e puxe para desconectar;
2. Para expor a agulha, gire a tampa superior e puxe para desconectar. Tenha cuidado para não danificar a agulha;
3. Para ajustar a dose corretamente utilize a linha superior da ponta do êmbolo, ajustando a dose na escala de graduação impressa no corpo da seringa;
4. Use a seringa apenas uma vez. Descarte em local apropriado após a utilização.

**Validade:** 05 anos

## Condições de Armazenamento:

Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente, ao abrigo da luz.

## Precauções e Restrições de Uso:

- Produto Estéril, a esterilidade é mantida até que o lacre individual permaneça intacto.
- Proibido Reprocessar, Produto de uso único, Descartar após uso.
- Descartar o produto de acordo com as recomendações locais e nacionais.
- Não utilizar produtos vencidos ou com a embalagem danificada.
- Utilize técnica asséptica antes de realizar o procedimento;

## Para pacientes que utilizam mais de um tipo de insulina:

- Não altere a ordem da mistura prescrita pelo médico;
- Não altere o modelo e a marca da seringa e agulha sem consultar o médico ou farmacêutico;
- Siga estas recomendações para evitar erros de dosagem

**Registro ANVISA/MS:** 80511910006 | **Classe de Risco:** II | **Validade do Registro:** Vigente

## Fabricado por:

DL Médica, S.A. de C.V.  
Febrero de 1917 S/N, Col. Zona Industrial,  
Chalco, Edo. de México, México  
C.P. 56600

**Procedência:** Made in Mexico

## Observações:



## DISTRIBUIDOR OFICIAL:

MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI  
CNPJ: 33.811.197/0001-06

Rua Goiás, 112 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-550 Fone: (15) 3224-3023