



SERINGAS PARA INSULINA MEKON - 0,5ML - 8x0,25MM

INDICAÇÃO:

A SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA FIXA MEKON de uso manual é utilizada intradermicamente para aplicar insulina U100, toxina botulínica e outros medicamentos.

PRECAUÇÕES:

Após a realização do procedimento descartar a SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO COM AGULHA FIXA MEKON em local próprio para materiais cortantes contaminados.

Para os pacientes que misturam dois tipos de insulina recomenda-se não alterar a ordem da mistura prescrita pelo médico.

ADVERTÊNCIAS:

- A seringa MEKON deve ser utilizada uma única vez. Para evitar a sua reutilização indevida, descarte a seringa e a agulha imediatamente após a aplicação.
- Estéril se a embalagem estiver selada e não danificada.

CUIDADOS:

Siga estas instruções a fim de evitar erros na dosagem.

COMPOSIÇÃO:

Cilindro e Êmbolo: Polipropileno

Tampas: Polietileno

Agulha: Aço Inoxidável 304

Vedação: Borracha sintética (Poliisopreno)

MODO DE USAR:

1. Antes de iniciar a aplicação de insulina ou outro medicamento, lavar as suas mãos com água e sabão.
2. Limpar o frasco com álcool e algodão.
3. Preparar a insulina.
4. Limpar perfeitamente a área de aplicação com álcool e algodão.
5. Segurar a pele com ajuda do dedo polegar e indicador e formar uma prega; inserir a agulha inclinada a um ângulo entre 45° e 90°.
6. Puxar um pouco o êmbolo e se observar sangue, retirar a agulha e injetar do outro lado.
7. Uma vez que a agulha estiver introduzida, empurrar o êmbolo suavemente até que todo o conteúdo da insulina seja injetado.
8. Ao terminar retirar a agulha e descartar a seringa para insulina.
9. Para medir a dose corretamente, encoste o êmbolo no fundo da seringa. Puxe o êmbolo levando-o até a dosagem desejada, localizando-o na escala gravada no corpo da seringa.



Distribuidor Oficial:
MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI – RUA GOIÁZ 112, CENTRO - SOROCABA - SP
CEP 18035-550 - CNPJ 33.811.197/0001-06

FABRICADO POR:
DL Médica, S.A. de C.V.
Febrero de 1917 S/N, Col. Zona Industrial,
Chalco, Edo. de México, México - C.P. 56600



Atendimento ao consumidor
SAC: (15) 3224-3023
e-mail: sac@medforma.com.br

SERINGAS PARA INSULINA MEKON - 0,5mL – 8x0,25mm

Nome Técnico: Seringas Descartáveis

Part Number: MEKS05825100

Marca / Submarca: MEKON

Código de barras: .

Modelo: Seringas para insulina – 0,5mL (1/2") – 8x0,25mm -31G 5/16"

Insulina U-100: para 50 unidades ou menos

Cada traço na escala de graduação representa 1 unidade

Atóxica | Apirogênica | Latex Free

Seringa estéril de uso único para insulina com agulha fixa

- Agulha Ultra-fina – Bisel Multi-facetado com revestimento lubrificante, que permite a injeção mais suave e confortável

Metodo de esterilização: **ESTÉRIL IOE** - Esterilidade garantida por óxido de etileno .

Produto certificado pelo INMETRO - Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011.

Apresentação: Caixa com 100 unidades (10x10) Embalagem Blister



Indicação: As Seringas para Insulina com Agulha Mekon são produtos de finalidade médica, para administração de insulina, toxina botulínica e outros medicamentos. Consiste em tubo graduado com êmbolo móvel, conectados a agulha.

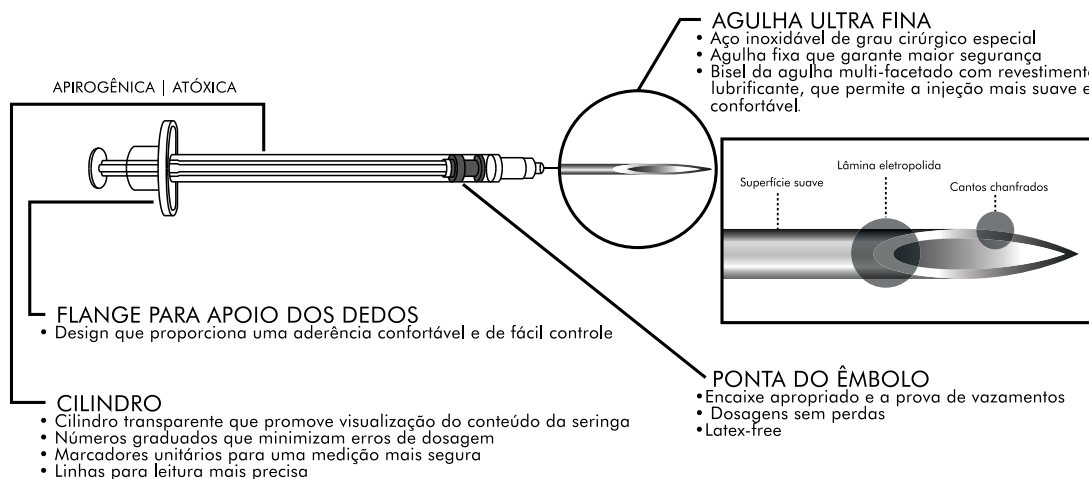


Imagem ilustrativa da seringa para insulina

Composição:

Cilindro: Polipropileno / CAS No. 9003-07-0

Êmbolo: Polipropileno / CAS No. 9003-07-0

Vedação: Mistura de: Poliisopreno (100 partes), Enchimento (70 partes) e Acelerador (0.1 parte)

Agulha: Aço Inoxidável / STS 304L

Tampa: Polietileno / CAS No. 9002-88-4



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ: 33.811.197/0001-06

Rua Goiás, 112 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-550 Fone: (15) 3224-3023

SERINGAS PARA INSULINA MEKON - 0,5mL – 8x0,25mm

Instruções de Uso:

1. Para expor o êmbolo, gire a tampa inferior e puxe para desconectar;
2. Para expor a agulha, gire a tampa superior e puxe para desconectar. Tenha cuidado para não danificar a agulha;
3. Para ajustar a dose corretamente utilize a linha superior da ponta do êmbolo, ajustando a dose na escala de graduação impressa no corpo da seringa;
4. Use a seringa apenas uma vez. Descarte em local apropriado após a utilização.

Validade: 05 anos

Condições de Armazenamento:

Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente, ao abrigo da luz.

Precauções e Restrições de Uso:

- Produto Estéril, a esterilidade é mantida até que o lacre individual permaneça intacto.
- Proibido Reprocessar, Produto de uso único, Descartar após uso.
- Descartar o produto de acordo com as recomendações locais e nacionais.
- Não utilizar produtos vencidos ou com a embalagem danificada.
- Utilize técnica asséptica antes de realizar o procedimento;

Para pacientes que utilizam mais de um tipo de insulina:

- Não altere a ordem da mistura prescrita pelo médico;
- Não altere o modelo e a marca da seringa e agulha sem consultar o médico ou farmacêutico ;
- Siga estas recomendações para evitar erros de dosagem

Registro ANVISA/MS: 80511910006 | **Classe de Risco:** II | **Validade do Registro:** Vigente

Fabricado por:

DL Médica, S.A. de C.V.
Febrero de 1917 S/N, Col. Zona Industrial,
Chalco, Edo. de México, México
C.P. 56600

Procedência: Made in Mexico

Observações:



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 33.811.197/0001-06

Rua Goiás, 112 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-550 Fone: (15) 3224-3023