



# MICROCÂNULAS PARA PREENCHIMENTO FACIAL



Apresentação caixa com 10 unidades

<b>30G</b>	25mm	Produto: A/H Indicação: preenchimentos, olheiras e lábios.
<b>27G</b>	38mm 50mm	Produto: A/H Indicação: preenchimentos, olheiras e lábios.
<b>25G</b>	50mm 38mm	Produto: A/H Indicação: preenchimentos, olheiras e lábios.
<b>23G</b>	38mm 50mm	Produto: A/H Indicação: sulco nasogeniano, olheiras, ponta nasal e lábios.
<b>22G</b>	50mm 70mm	Produto: A/H Indicação: sulco nasogeniano, contorno, face e lábios.
<b>21G</b>	50mm 70mm	Produto: Sculptra, Radiesse e produtos mais densos. Indicação: Face geral.
<b>18G</b>	50mm 70mm	Produto: Produtos definitivos, muitos densos (PMMA) e plasma gel. Indicação: Facial e corporal.

ANVISA  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária




Registro ANVISA  
81926099007

Produto Estéril - Microcânula com agulha de pertuito - Validade de 5 anos.

Distribuidor Oficial:  
MEDFORMA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - RUA GOIÁZ 112, CENTRO - SOROCABA - SP  
CEP 18035-550 - CNPJ 33.811.197/0001-06

FABRICADO POR:  
Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.  
Addr: No.658 Gaochao Road, 201803 Shanghai, P.R.C.

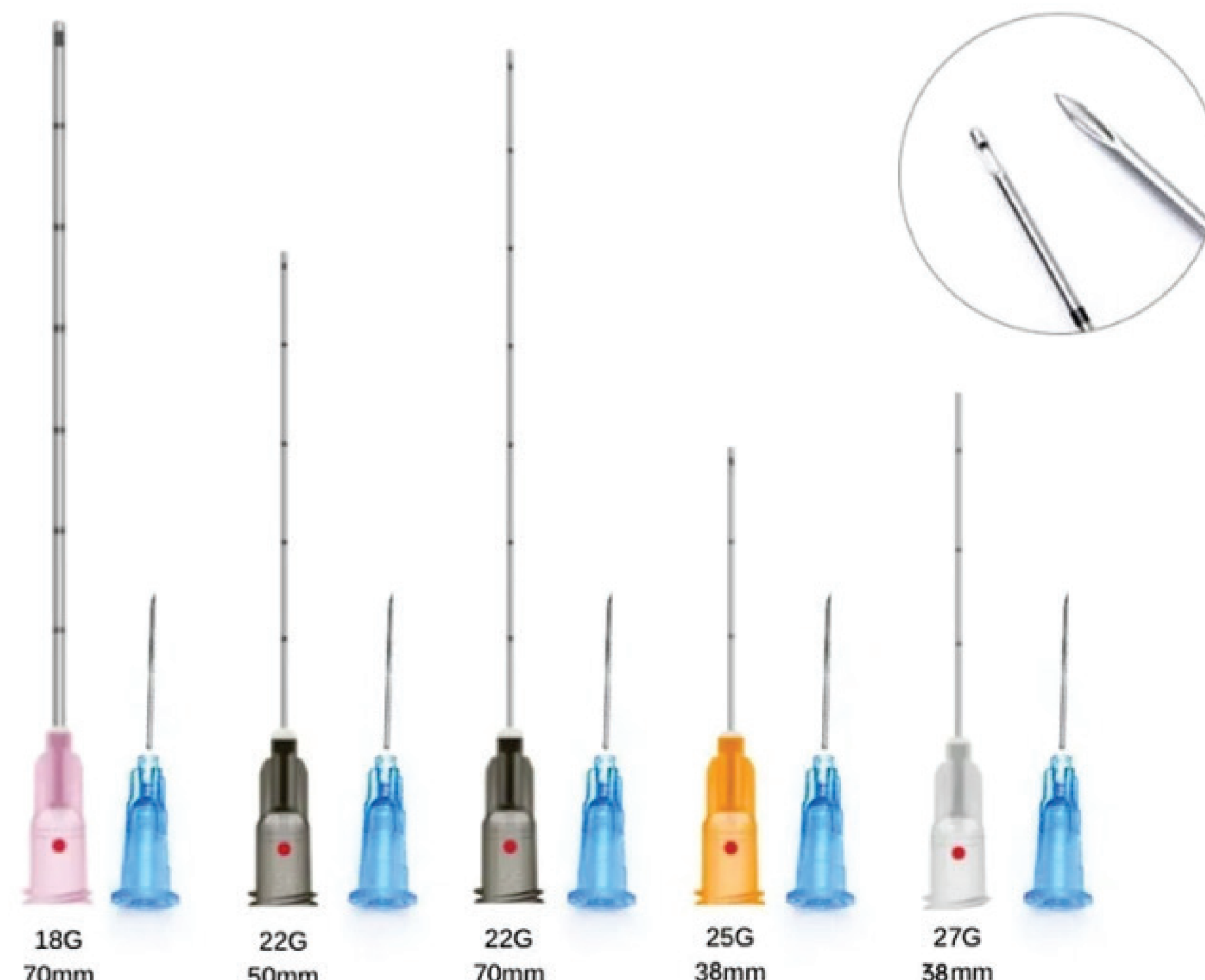





# MICROCÂNULAS PARA PREENCHIMENTO FACIAL

## INDICAÇÃO:

- Harmonização facial:  
Preenchedores com Ácido Hialurônico, Hidroxiapatita de Cálcio, Ácido L-Polilático, Aplicação de bioestimuladores.

## VANTAGENS:

- Impede injeção intra-vascular inadvertida.
- Elimina o risco de embolização de vasos.
- Reduz o risco de hematomas e equimoses.
- Tamanhos variados para aplicação em diferentes áreas.
- Abertura lateral da ponta da Microcânula MEKON® assegura uma aplicação precisa do material a ser injetado.
- As Microcânulas MEKON® possuem uma fina parede feita de aço de alta qualidade, e sua superfície lisa siliconada assegura uma introdução sem traumas.

## BENEFÍCIOS:

- Ponta arredondada/romba e sem corte.
- Semiflexível.
- Marcação de centímetros para melhor controle e posicionamento.
- Sinalizador de saída.
- Maior segurança.
- Deslizamento perfeito.

## COMPOSIÇÃO:

A microcânula MEKON® é constituída de aço inoxidável AISI 304 em seu corpo siliconada e capa protetora e encaixe da cânula com a seringa em material plástico olefínico de polipropileno.

## PRECAUÇÕES:

- Abrir a embalagem do produto cuidadosamente e não deixar que o produto toque em outros objetos.
- A Microcânula MEKON® deve ser utilizada somente por profissional da saúde autorizados.
- Antes de utilizar o produto, o profissional deverá fazer um diagnóstico da condição da pele do paciente, idade e estado físico.
- Antes de utilizar o produto, o profissional adequado poderá decidir sobre a necessidade de utilizar um anestésico.
- Não aplicar força excessiva no manuseio da Microcânula MEKON®.
- Após o uso, o produto deverá ser colocado de volta na embalagem original, para fazer o devido descarte em coletor de material perfurocortante.
- Este produto não pode ser consertado.
- Produto de uso único.
- Manter o produto fora do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade.
- Não utilizar o produto caso haja sinais de violação do blister que garante a sua esterilização.

## CUIDADOS:

- Este produto não deve ser usado em pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes deste dispositivo;
- Este produto não deve ser usado no caso de doença de pele aguda ou crônica (infecção ou inflamação) próxima da área a ser tratada.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: 18Gx50MM | 18Gx70MM | 21Gx50MM | 21Gx70mm | 22Gx50MM | 22Gx70MM | 23Gx38MM | 23Gx50MM | 25Gx38MM | 25Gx50MM | 27Gx38MM | 27Gx50MM | 30Gx50MM  
NCM 90183929 - SKU/COD: MK18X50C10 | MK18X70C10 | MK21X50C10 | MK21X70C10 | MK22X50C10 | MK22X70C10 | MK23X38C10 | MK23X50C10 | MK25X38C10 | MK25X50C10 | MK27X38C10 | MK27X50C10 | MK30X25C10